



### Pièces du bras articulé

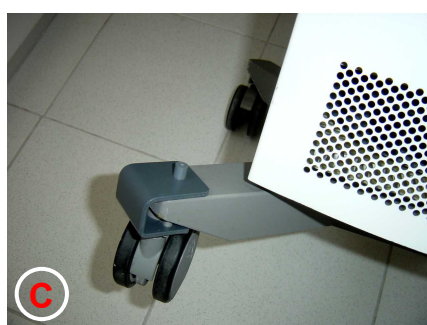

- Partie supérieur du bras
- Crochet pour tenir le tuyau
- Clips du pied et fixation inférieur
- Guide et fixation supérieur
- Partie inférieur du bras

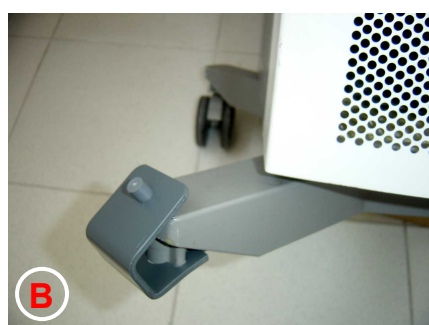

### Assemblage

1. Identifier les pièces (A)
2. Enlever une roux
3. Enfiler le clip du pied (B) (C)
4. Viser la partie supérieur et la partie inférieur du bras fermement
5. Enfiler - de bas en haut - le guide de fixation supérieur dans la bonne orientation (F)
6. Poser la partie inférieur du bras dans le pignon de la fixation du pied (C)
7. Coincer le guide de fixation dans le poignet du Cryo 5 (D)
8. Poser le crochet autour de la poigner-vis de serrage et enfiler le tuyau flexible. (E)

Assistance téléphonique par LaserMax : 0 685 405 703